

LICETEC®



Návod na použitie

1 Pred použitím V-Comb

Úvod	str 3	Dôležité
bezpečnostné informácie	str 4	
Prehľad	str 5	
Technické údaje	str 6	

2 Začínať.....str. 7**3 Inštalácia zachytávacieho filtra V-Comb.....****4 str. 8 Obsluha V-Comb..... str 10****5 Údržba hrebeňa V-Comb.....str. 12****6 Obdobie liečby.....str. 13****7 Dôležité zhrnutie liečby.....str. 13****8 Záruka na produkt.....str. 14****9 Kontaktné údaje a ďalšie poznámky.....str. 15**

Ďakujeme, že ste si zakúpili Licetec V-Comb.


V balení by ste mali mať nasledovné: 1x V-Comb jednotka (vrátane adaptéra)

4x Jednorazové zachytávacie filtre 1x

Stručný návod

1x Návod na použitie

1x Čistiaca kefka

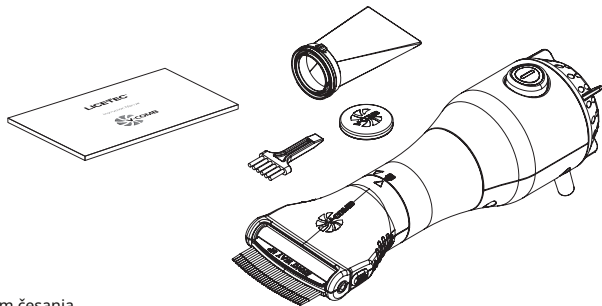

VLASTNOSTI

- Bezchemická liečba vší
- Zaoblené zuby z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľným uhlom česania
- Filtračná jednotka s LED osvetlením
- Jednorazový filter na zachytávanie vší
- Kompaktný a ergonomický dizajn
- Zariadenie napájané striedavým prúdom





⚠ POZOR! Malé časti môžu byť vdychnuté, prehlnuté alebo nebezpečné.
Kábel môže kvôli svojej dĺžke spôsobiť uškrtenie alebo zadusenie!




Pred použitím V-Comb si prečítajte pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.

PRED POUŽÍVANÍM SVOJA V-COMB SI PROSÍM PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A USCHOVAJTE SI JE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

POZOR

- Skontrolujte, či je elektrický menovitý výkon zdroja rovnaký ako menovitý V-Comb a či je napájací zdroj v plne použiteľnom stave.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, toto zariadenie musí byť pripojené len k napájacej sieti s ochranným uzemnením.
- V-Comb môže obsluhovať väčšina dospelých pod podmienkou, že obsluha porozumela návodu na obsluhu.
- Hrebeň V-Comb je určený len na použitie na vlasy na hlave a môže sa používať v interiéri aj exteriéri iba za sucha.
- Vhodné na použitie u väčšiny dospelých a detí starších ako tri roky.
- Upozorňujeme, že tento výrobok nesmú používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom.
- Deti (ani pod dohľadom) by sa so zariadením nemali hrať.
- Zabráňte kontaktu s očami, ušami alebo ústami.
- Nepoužívajte, ak sú prítomné rany alebo poškodená koža.
- Hlavnú časť hrebeňa V-Comb neponárajte do vody ani inej tekutiny.
- Všetky elektrické spoje udržiavajte čisté a suché.
- Dôrazne sa odporúča vyčistiť tento výrobok ihneď po každom použití.
- Zabráňte pádu alebo nárazu produktu akýmkoľvek spôsobom.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím alebo nesprávnou manipuláciou.
- Zariadenie V-Comb a príslušenstvo musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi WEEE.
-  Nie sú povolené žiadne úpravy tohto zariadenia!
- Neumiestňujte V-Comb tam, kde bude ťažké ho odpojiť od elektrickej zásuvky.
-  Nepoužívajte ani neskladujte V-Comb na mieste, kde je vystavený priamemu slnečnému žiareniu, extrémnemu teplu alebo chladu, vode, vláknam, srsti domácich zvierat, prachu atď.
-  Neupravujte toto zariadenie bez súhlasu výrobcu!
-  **POZOR!** Ak sa zariadenie upraví, musí sa vykonať príslušná kontrola a testovanie, aby sa zabezpečilo nepretržité bezpečné používanie zariadenia.

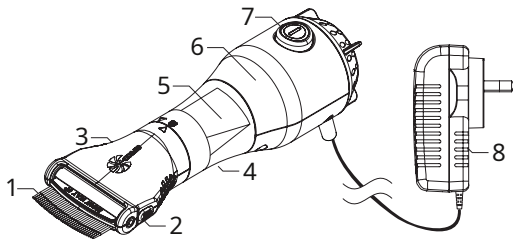

Zoznam dielov V-Comb

1. Zaoblené zuby z nehrdzavejúcej ocele
2. Gombík nastavenia uhla hrebeňa
3. Česacia hlava
4. LED osvetlená filtračná jednotka
5. Jednorazový zachytávací filter
6. Hlavné telo
7. Vypínač
8. Adaptér



Pred použitím V-Comb si prečítajte pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.

VÝSTRAHA!

Používajú sa iba zachytávacie filtre typu V-Comb.



Complies with Australian Standards



Complies with EU Medical Devices Directive



WEEE Recycling of electrical goods



Do not reuse capture filter



Electric Shock Protection



Indication of potential hazard

Popis produktu

Vákuovo poháňané zariadenie na odstraňovanie vší

Model produktu

TTVC01

Model napájacieho adaptéra

PSED240100S W

Vstupné hodnotenie

240V, AC 50~60Hz

Výstupné hodnotenie

24V DC 1A

Zdroj energie

240V, AC 50~60Hz

Ochrana proti elektrickému šoku

Typ BF

Ochrana proti vniknutiu

IP22 (Chránené pred cudzími predmetmi rovnými alebo väčšími ako 12,5 mm a pred padajúcimi kvapkami vody pri naklonení krytu do 15°).

EMC ochrana

Pozrite si časť Súlad v príručke - strany 14 - 21

Prevádzková teplota/ vlhkosť

5 °C až 40 °C
RH 15% až 93% (bez kondenzácie)

Skladovacia teplota/ vlhkosť

-25 °C až 70 °C
RH 5 % ≤ 93 % (bez kondenzácie)

Hmotnosť

približne. 320 gramov

Životnosť hrebeňa V-Comb/ príslušenstva

približne. 5 rokov (1000
hodín) cca. 10 rokov

Poznámka

Likvidácia tohto produktu by mala byť vykonaná v súlade s miestnymi a národnými predpismi WEEE pre likvidáciu elektronických produktov.


Začínat'

1. Skontrolujte obsah krabice.



Pred použitím V-Comb si prečítajte pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.

⚠ POZOR! Napájací adaptér V-Comb je trvalo pripojený k V-Comb a nedá sa odpojiť.

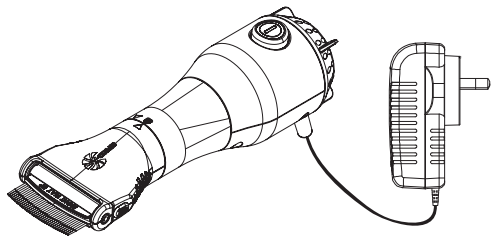


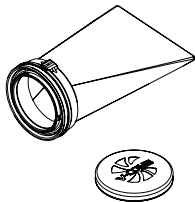
2. Pred pripojením adaptéra V-Comb k zdroju napájania skontrolujte, či je elektrický výkon zdroja rovnaký ako menovitý výkon V-Comb a či je zdroj napájania v plne použiteľnom stave.

Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, toto zariadenie musí byť pripojené iba k napájacej sieti s ochranným uzemnením a všetky elektrické spoje by mali byť udržiavané čisté a suché.


Inštalácia zachytávacieho filtra V-Comb

1. Roztrhnite ochranný obal filtra, ktorý je súčasťou balenia. Obal bude obsahovať zachytávací filter a viečko, viečko si odložte na použitie po ošetrení.

 Zachytávacie filtre sú určené len na jedno použitie. (K dispozícii sú náhradné zachytávacie filtre).




2. Bezpečne pripevnite zachytávací filter na česaciu hlavu V-Comb a zaistite, aby zapadol na miesto (kým nebudete počuť kliknutie).

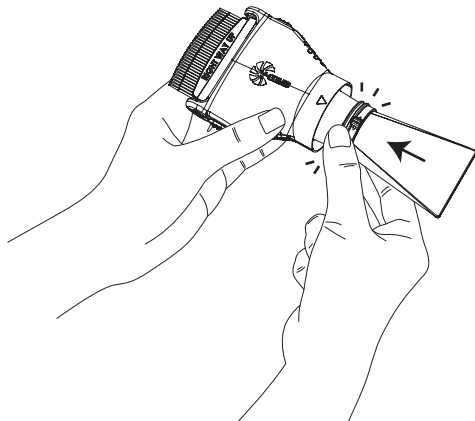


Inštalácia zachytávacieho filtra V-Comb

3. Opatrne nasadte česaciu hlavu, pričom dbajte na to, aby ste nepoškodili alebo nerozdrvili zachytávací filter.

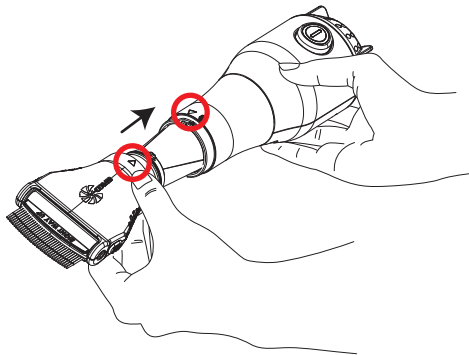

4. Zarovnajte vodiace šípky (zvýraznené nižšie) a otočením zaistite česaciu hlavu k hlavnému telu.



Teraz je česacia hlava bezpečne zaistená v správnej polohe.

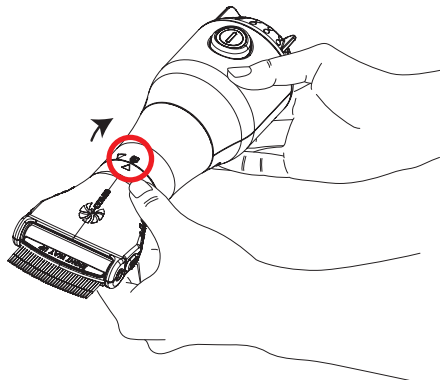

Obsluha V-Comb

1. Ak chcete zmeniť uhol česania, podržte a zatlačte gombíky na oboch stranách česacej jednotky a nastavte uhol zubov. Uvoľnite oba gombíky, aby ste ich zaistili na mieste.

K dispozícii sú dve nastavené polohy:
rovná poloha alebo poloha zhrňania.

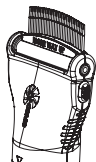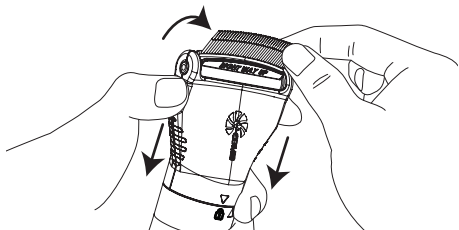


Rovná poloha




Pozícia hrabania

2. Vlasy by mali byť čisté, upravené a suché. Dôkladne kefujte, aby ste odstránili všetky uzly.


Rozdeľte vlasy na časti, ktoré nie sú širšie ako zuby, pomocou sponiek do vlasov. Zapnite V-Comb a začnite liečbu. Vždy začnite od zátylku a postupujte nahor, po jednotlivých častiach, temeno hlavy prečesajte ako posledné. Uistite sa, že hrebeň držíte správnym smerom hore.

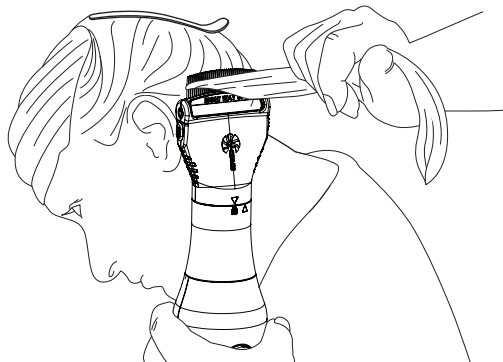

3. Zamerajte sa vždy na jednu malú časť, nie širšiu ako zuby. Prečesajte každú časť vlasov od koreňkov po končeky a zaistite, aby ste začali čo najbližšie k pokožke hlavy.

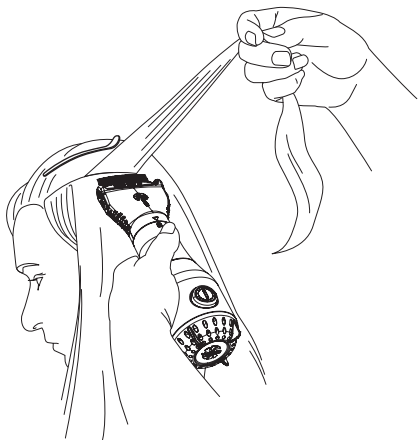


4. Prečesajte každú časť vlasov v rôznych smeroch (hore, dole, vľavo a vpravo). Toto opakujte v každej časti niekoľkokrát.

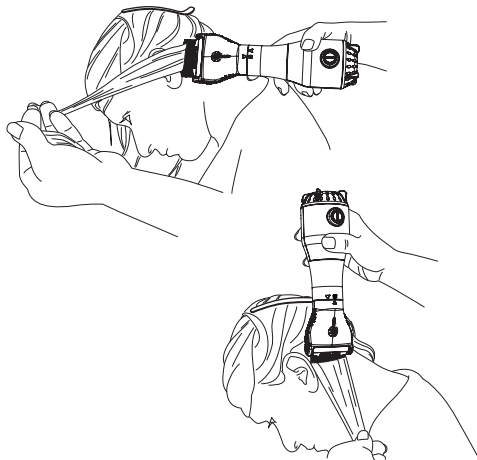


Údržba hrebeňa V-Comb

1. Po ošetrení vypnite V-Comb a odpojte ho od zdroja energie. Demontujte česaciu hlavu z hlavného tela rozobratím jednotky. Opatrne odpojte zachytávací filter, nasadte kryt zachytávacieho filtra V-Comb na zachytávací filter a riadne ho zlikvidujte.

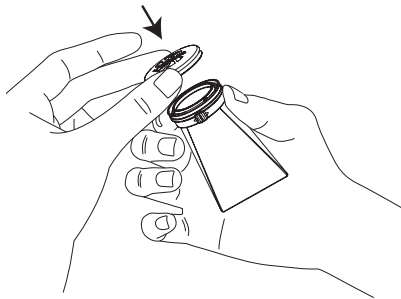


Do zadnej časti česacej hlavy nič nekladajte ani ju nedržte pod tečúcou vodou. To poškodí ventil.

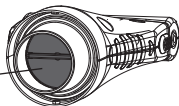

2. Pomocou dodanej kefky očistite všetky vši a vajíčka, ktoré by sa mohli zachytiť medzi zubami hrebeňa. Naplňte misku alebo drez, asi 10 cm hlboký, horúcou (nie vriacou) vodou z vodovodu a ponorte iba česaciu hlavu.

⚠ NEPONÁRAJTE HLAVNÉ TELO V-COMB, SPÔSOBÍ TO POŠKODENIE ZARIADENIA. Vyberte z vody a dôkladne vysušte. Netraste česaciu hlavou, pretože by ste mohli poškodiť ventil.

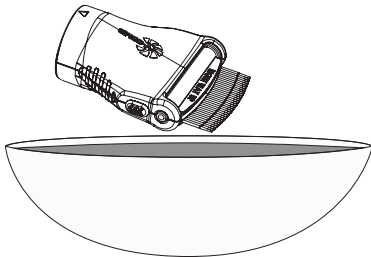

⚠ NA ČISTENIE V-COMB NEPOUŽÍVAJTE VRIACU VODU, KEĎŽE POŠKODÍ JEDNOTKU. Ideálna teplota vody je 70 - 80°C.

Obdobie liečby

Pokračujte v česaní vlasov denne po dobu najmenej dvoch týždňov počas napadnutia, aby ste sa uistili, že všetky vší a vajíčka boli odstránené. V prípade pretrvávajúceho ohniska je nevyhnutné každodenné ošetrovanie, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k opätovnému zamoreniu. Na pomoc pri predchádzaní problému opätovného zamorenia sa odporúča pokračovať v používaní V-Comb dvakrát týždenne.

Dôležité zhrnutie liečby

1. Uistite sa, že vlasy sú čisté a bez uzlov alebo spleti.
2. Rozdeľte a oddel'te vlasy. Zamerajte sa na jednu časť v čase, než budete pokračovať.
3. Udržujte časti vlasov menšie, aby ste dosiahli lepšie výsledky (nie širšie ako zuby hrebeňa).
4. Začnite česať od zátylku a postupujte až k temenu hlavy.
5. Každú časť vlasov niekoľkokrát prečesť vo všetkých uhloch.
6. Počas zavšivenia dôkladne a pravidelne česajte – vytrvalosť je kľúčom k úspešnému odvšiveniu!

Záruka na produkt

Výrobca vynakladá maximálne úsilie na to, aby jeho produkty boli vyrobené bez akýchkoľvek chýb. V zriedkavých prípadoch chýb spôsobených chybným spracovaním alebo materiálmi však garantujeme, že produkt alebo akúkoľvek jeho časť bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záruka sa poskytuje iba pôvodnému kupujúcemu a je platná jeden rok od dátumu nákupu, ktorý uviedol obchodný zástupca. Táto záruka neplatí, ak je výrobok pozmenený alebo opravený alebo inak s ním manipulovaný neoprávnenými osobami a/alebo je používaný inak ako v súlade s pokynmi výrobcu a/alebo podlieha inému než rozumnému použitiu výrobku jeho povahy. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvňuje vaše práva vyplývajúce zo zákona.

Ak si myslíte, že váš produkt môže byť chybný, kontaktujte ToLife Technologies na čísle 1800 353 014 (pre WA volajte 9350 5688) a dohodnite si opravu alebo výmenu produktu. Chybné produkty je možné poslať späť na našu bezpoštovnú adresu: ToLife Technologies, odpoveď zaplatená 36, PO Box 36, Welshpool, Western Australia 6986.

Náš tovar sa dodáva so zárukami, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho spotrebiteľského zákona. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí za závažnú poruchu a na kompenzáciu za akúkoľvek inú rozumne predvídateľnú stratu alebo poškodenie. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu.

Je dôležité, aby bol V-Comb nakonfigurovaný a nainštalovaný/uvedený do prevádzky v súlade s pokynmi/návodmi uvedenými v tomto dokumente a používal sa iba v konfigurácii, v akej bol dodaný. Bezdrôtové komunikačné zariadenia, ako sú zariadenia bezdrôtovej domácej siete, mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny a ich základňové stanice, vysielачky môžu ovplyvňovať toto zariadenie a mali by byť umiestnené aspoň v dostatočnej vzdialenosti od V-Comb.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the V-Comb			
The V-Comb is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the V-Comb can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the V-Comb as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.			
Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 KHz to 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23.3

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures objects and people.

Výrobca:

ToLife Technologies
53 Banksia Road,
Welshpool 6106
Západná Austrália