



SK INHALÁTOR NEBULIZÁTOR

PR-800



POZNÁMKA: Pred použitím produktu si pozorne prečítajte pokyny.

1. Čo je to nebulizér?

Systém medicínskeho vzduchového kompresorového nebulizátora je zdravotnícke zariadenie určené na dodávanie liekov predpísaných lekárom do dýchacích ciest pľúc. Kombinácia nebulizéra a vzduchového kompresora poskytuje aerosólovú hmlu na inhaláciu pacientom len na lekárske ošetrovanie.

2. Ako funguje nebulizér?

Táto jednotka je kompaktná, jednoducho sa obsluhuje a pohodlne sa prenáša. Na vytvorenie tlaku vzduchu používa jednovalcové piestové čerpadlo bez oleja. Vzduch prúdi cez vzduchový filter do jednotky vzduchového kompresora rozprašovača, von cez výstup trysky a potom cez rozprašovač.

3. Kontrolný zoznam na vybalení:

aerosólový rozprašovač, aerosólová hadička, náustok, vzduchový kompresor

4. Komponenty:

Komponenty štandardného rozprašovača:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| A. Napájací kábel | G. Nebulizér |
| B. Vzduchové otvory | H. Ústnykus |
| C. Konektor rúrky | I. Veľká maska |
| D. Vypínač | J. Malá maska |
| E. Filter&Cover | K. Vzduchová trubica |
| F. Priehľadný kryt | |

5. Ako vložiť liek do rozprašovača?

Ak chcete vložiť liek do rozprašovača, postupujte takto:

1. Otvorte uzáver.
2. Naplňte pohár liekom podľa predpisu lekára. Dbajte na to, aby množstvo liečiva nepresiahlo 6 ml (6 ccm) v mieste tekutiny!

3. Zatvorte uzáver.
4. Pripojte náustok.

Poznámka: Náustok sa má používať iba na perorálnu inhaláciu.

6. Ako ovládam nebulizér?

Ak chcete ovládať nebulizér, postupujte takto:

1. Zapojte vzduchový kompresor, ale nepripájajte nebulizér.
2. Skontrolujte, či je vzduchový filter pripavený ku vzduchovému kompresoru.
3. Zapnite hlavný vypínač.
4. Potom, čo vzduchový kompresor beží správne 1-2 minúty, pripojte tryskový výstup vzduchového kompresora do vstupu nebulizéra vzduchovou hadicou.
5. Začnite liečbu podľa pokynov svojho lekára.
6. Prirodzene sa nadýchnite a vydýchnite. Po ukončení liečby určite prestaňte.
7. Keď skončíte s používaním, najskôr vypnite jednotku vzduchového kompresora odpojte vzduchovú hadicu.

VAROVANIE: Nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov alebo v blízkosti výbušných materiálov.

7. Čo mám robiť po použití nebulizéra?

Aby váš nebulizér správne fungoval, po každom použití vykonajte nasledovné:

Po odpojení vzduchovej hadice odpojte náustok. Otvorte uzáver a vyprázdňte pohár. Nebulizér umyte tečúcou vodou alebo namočte na 15 minút do teplej vody. Pre dôkladnejšie a hygienické čistenie pridajte do vody trochu octu.

POZNÁMKA: Nebulizér nevarujte. Mohli by ste ho poškodiť. Pred uložením nebulizér úplne vysušte.



8. Ako vymeniť vzduchový filter?

Vo všeobecnosti by sa vzduchový filter mal vymieňať každé tri mesiace alebo po 300 použitíach.

Výmena vzduchového filtra: Odstráňte kryt filtra. Vymeňte filter. Znovu nasadte kryt filtra.

9. Akú údržbu pri skladovaní si nebulizér vyžaduje?

1. S nebulizérom zaobchádzajte vždy opatrne.
2. Keď zariadenie nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
3. Nebulizér uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Ak nebulizér skladujete, neohýbajte vzduchovú hadicu.
5. Ak svoj nebulizér skladujete, snažte sa ho udržiavať v nasledujúcich rozsahoch prostredia:
 - Teplota: -40°C-55°C • Relatívna vlhkosť:<95%
 - Atmosférický tlak: 0,05MPa-0,106MPa.
6. Ak je to možné, skladujte nebulizér v dobre vetranej miestnosti.

10. Špecifikácie:

Elektrická požiadavky:	AC 230V/50Hz / 120V/60Hz
Pracovný tlak:	>10 PSI / Max > 30 PSI
Voľný prietok vzduchu:	>8 l/min (počas pracy)
Hladina zvuku:	<58 dB
Hmotnosť:	2,1 kg
Veľkosť:	280 × 178 × 100 mm
Elektrická	UL 547 Trieda B
bezpečnosť: Max. pracovny čas:	30 min.
Pracovná teplota:	10 °C - 40 °C

11. Sprievodca riešením problémov:

Príliš veľa hluku

Príčina: V jednotke nie je žiadny filter.

Riešenie: Vložte filter do jednotky.

Nebulizér nebeží.

C: Hlavný vypínač kompresora je vypnutý.

S: Zapnite jednotku.

C: Nebulizér nebol vyčistený po predchádzajúcom použití.

S: Vyčistite jednotku.

C: Vzduchová hadica je ohnutá.

S: Odstráňte všetky ohyby alebo zalomenia vzduchovej hadice.

C: Filter je upchatý.

S: Vymeňte filter.

C: Nezostali žiadne lieky.

S: Pridajte do šálky primerané množstvo lieku, ktoré vám predpísal váš lekár.

C: Kryt nie je správne pripevnený.

S: Znovu nasadte uzáver.

Na vzduchovej hadici sa vytvorili kvapky vody _____

C: Liek bol preplnený.

S: Pridajte primerané množstvo lieku do pohára, pripojte vzduchovú hadicu k vzduchovému kompresoru a zapnite jednotku.

C: Nebulizér bol umytý, ale nie vysušený.

S: Opakovane otvárajte a zatvárajte nebulizér prstom, kým kvapky nezmiznú.

POZNÁMKA: V prípade akýchkoľvek iných problémov kontaktujte svojho predajcu.



AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCA EÚ:

WELLKANG LTD

Suita B, 29 Harley Street

LONDÝN W1G 9QR,

Anglicko, Spojené kráľovstvo

VYROBENÉ V PRC PRE:

Vyrobené v ČĽRpre:

Centrumelektroniki Sp. j.

TEL: +48 32 284 7222

FAX: +48 32 284 6888



CE0120



WELLKANG LTD

Suita B, 29 Harley Street

LONDÝN W1G 9QR,