

## Masážny prístroj na oči

Pred použitím si prečítajte tento návod a odložte pre budúce využitie.

Tento prístroj využíva technológiu infračerveného vyhrievania, ktorá masíruje oči a očné svaly. Je určený pre ľudí, ktorí pociťujú únavu očí a zabraňuje krátkozrakosti. Týka sa to hlavne študentov, osôb s poruchami zraku, starších ľudí a ľudí, ktorí trávajú pri počítači viac hodín denne.

Obsah balenia:

- masážny prístroj
- adaptér
- USB kábel

Pred použitím: Skontrolujte, či produkt má funkčné napájanie. Ak je batéria slabá, alebo sa prístroj vypne, alebo sa prístroj nedá zapnúť, prístroj nabite a znovu skúste zapnúť. Keď je prístroj plne nabitý, vytiahnite z neho napájací kábel. Zabráňte dlhému nabíjaniu a tak predĺžite životnosť produktu.

Nabíjanie:

1. USB kábel zasuňte do USB portu produktu.
2. Počas nabíjania svieti kontrolka červenou farbou, po nabití svieti kontrolka modrou farbou.
3. Počas nabíjania nie je možné zapnúť prístroj.
4. Hlavný motor je napájaný zabudovanou nabíjateľnou batériou, ktorá dodáva energiu 4-5 hodín.

Doba prevádzky: Obvyklá doba prevádzky je 15 minút. Ak potrebujete prístroj použiť dlhší čas, znovu ho zapnite. Odporúča sa nepoužívať prístroj dlhšie ako 15 minút vkuse.

Zapnutie prístroja: Stlačením a podržaním tlačidla (Open/Close mode) počas 2 sekúnd zapnete prístroj a vstúpite do auto režimu. Stláčaním tlačidla prepínate režimy masáže:

Automatický režim → Relaxačný režim → Režim tlaku vzduchu → Vibračný režim → Režim tepelnej kompresie

Opätovným stlačením a podržaním rovnakého tlačidla počas 2 sekúnd prístroj vypnete.

Pokyny pri používaní:

1. Nepoužívajte prístroj pri prechádzke alebo šoférovaní.

2. Nepoužívajte prístroj v prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou.
3. Nepoužívajte prístroj pri poruchách zraku, po operácii očí, pri glaukóme, katarakte, odlúpení rohovky a iných vážnych očných chorobách.
4. Pacienti po mozgovej príhode, s nízkym alebo vysokým krvným tlakom by mali byť obozretní pri používaní prístroja a v prípade nežiadúcich účinkov konzultovať používanie prístroja so svojim lekárom.
5. Osoby s mentálnym postihnutím by mali prístroj používať pod dozorom. Ak pri používaní pociťujú nepríjemné pocity, musia prístroj ihneď prestať používať.
6. Nepoužívajte prístroj v stave opilstosti alebo pod vplyvom iných omamných látok.
7. Prístroj má funkciu tepelnej kompresie, osoby s vysokou citlivosťou na teplotu by mali prístroj používať s opatrnosťou.
8. Prístroj priložte na oči pred jeho zapnutím, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
9. Pred použitím si vyberte kontaktné šošovky, sponky z vlasov a iné vlasové doplnky.
10. Tento prístroj je produkt osobnej hygieny. V žiadnom prípade nie je určený ako náhrada lekárskeho prístroja.
11. Ak pri alebo po používaní prístroja pociťujete bolesť alebo nepríjemný pocit, okamžite ho prestaňte používať a konzultujte jeho používanie s lekárom.
12. Prístroj je určený na domáce použitie, nie je určený na diagnózu, liečbu a iné komerčné účely.
13. Ak potrebujete prístroj vyčistiť, použite vatú namočenú v lekárskom liehu. Prístroj nečistite vodou. Neponárajte do vody.
14. Prístroj svojvoľne nerozoberajte.
15. Používajte len priložený adaptér
16. Pri použití majte zatvorené oči. Po použití môžete mať rozostrené videnie, ktoré sa vráti do normálneho stavu po 1-3 minútach.

### Riešenie problémov

Pri vyskytnutí problémov počas prevádzky produktu vyhľadajte problém a jeho riešenie uvedené nižšie v tabuľke. Ak aj po vykonaní uvedených krokov prístroj nefunguje, vypnite prístroj a kontaktujte servisné centrum. Prístroj nerozoberajte a neopravujte svojvoľne!

<b>Chyba</b>	<b>Možný zdroj chyby</b>	<b>Riešenie</b>
Prístroj sa nezapne	Slabá batéria	Nabite prístroj
	Prepät'ová ochrana	Zapojte nabíjačku, nabite prístroj, vypnite ochranu na 5 sekúnd
	Batéria sa nenabila	Poškodená nabíjačka
Tlak vzduchu je príliš slabý	Slabá elektrina	Nabite prístroj

#### Údržba:

Ak je prístroj znečistený, utrite ho suchou jemnou handičkou. Ak je prístroj veľmi znečistený, handičkou môžete namočiť do lekárskeho alkoholu. Prístroj po použití odložte na bezpečné miesto. Nezaťažujte ťažkými predmetmi. Zabráňte kontaktu s vlhkosťou, s hlodavcami. Ak prístroj prestane fungovať, kontaktujte servisné centrum. Prístroj nerozoberajte.

#### Transport a skladovanie

Skladujte pri teplote  $-40^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$  pri vlhkosti menej než 80 percent v dobre vetraných miestnostiach, pri tlaku vzduchu 860-1060hPa.

Transport: Produkt je odolný voči nárazom, je vhodný na leteckú, železničnú, cestnú aj lodnú prepravu. Zabráňte kontaktu s vodou, dažďom a silným nárazom. Ak produkt skladujete po dobu dlhšiu než 6 mesiacov, skontrolujte balenie, a prístroj nabite po dobu 30 minút v dobre vetraných miestnostiach. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

#### Špecifikácia:

Pracovné napätie: DC 5V

Výkon: 4,5W

Adaptér: AC 100-240V DC 5V

Bezpečný prúd:  $\leq 500\text{mA}$